

Hemo Control

Durchführung der Messung



1 Stellen Sie sicher, dass der Analyzer messbereit ist. Siehe Hemo Control Bedienungsanleitung



2 Eine Küvette aus der Dose entnehmen und diese sofort wieder schließen. Der Deckel muss komplett rundum geschlossen sein. Die Küvette nur am Griff anfassen und das optische Auge nicht berühren.



3 Punktionsstelle desinfizieren und gut abtrocknen lassen. Seitliche Punktion des Fingers durchführen.



4 Die ersten 1 - 2 Blutropfen wegwischen und leicht nachdrücken. Der Tropfen muss groß genug sein, um die Mikroküvette in einem Zug zu füllen.



5 Die Küvetten spitze mittig an den Blutropfen halten und die Öffnung mit einem Zug vollständig und luftblasenfrei füllen.



6 Überschüssiges Blut auf den Außenseiten der Mikroküvette entfernen. Vorsicht, dabei die Mikroküvette nicht wieder leersaugen.



7 Die Küvettenaufnahme durch vorsichtiges Herausziehen öffnen. Küvette einsetzen. Sicherstellen, dass die Küvette korrekt positioniert ist. Der Griff muss nach rechts zeigen.



8 Das Schließen der Küvettenaufnahme durch leichtes Andrücken startet die Messung.



9 Das Ergebnis erscheint nach ca. 25-60 Sekunden. Die Anzahl der angezeigten Symbole kann je nach gewählter Option unterschiedlich sein. Drücken Sie Ok, um den Ergebnisbildschirm zu verlassen.

Hersteller

EKF diagnostic GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
39179 Barleben, Germany
Tel +49 (0)39203 5110

Vertrieb

EKF Diagnostics Holdings plc
EKF-diagnostic GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
39179 Barleben
Tel +49 (0)39203 5110

EKF | Diagnostics
for life