



KURZGEBRAUCHSANWEISUNG

BLUTGASENTNAHMESYSTEM (STERIL)

Verwendungszweck: In-vitro-Diagnostikum zur arteriellen Blutentnahme mit Gerinnungshemmer, Probengefäß zur Aufnahme, Aufbewahrung und Abgabe von Blutproben aus dem menschlichen Körper für anschließende pH/Blutgas-, Oximetrie-, Elektrolyt- und Metabolit-Analysen.

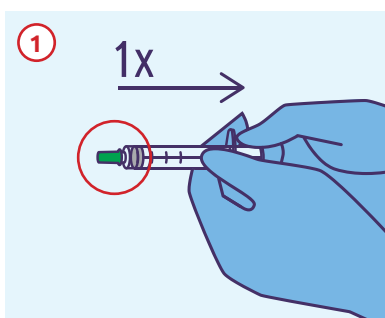


1 Kolben 1x ziehen
(mit aufgesetzter Luer-Verschlusskappe)

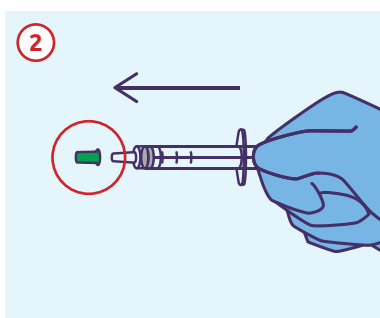


2 Luer-Verschlusskappe entfernen und zum
späteren Gebrauch aufbewahren





3 Blutprobenentnahme durch
geschultes medizinisches Personal

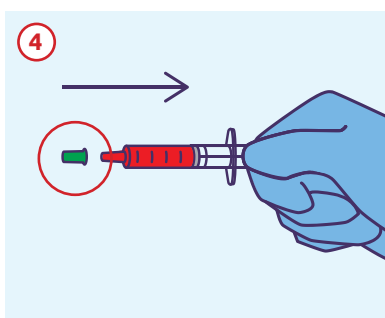


4 Mit Luer-Verschlusskappe
verschließen

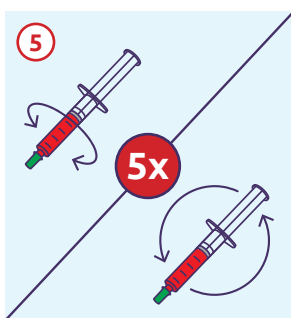

5 5 mal rollen, 5 mal invertieren

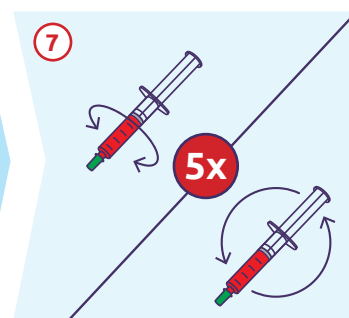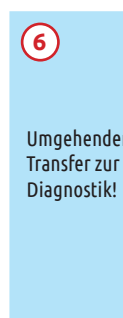


7 5 mal rollen, 5 mal invertieren

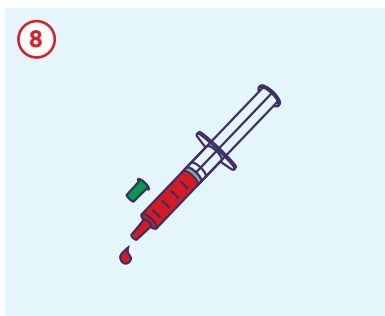

8 Luer-Verschlusskappe abnehmen,
ersten Tropfen verwerfen



9 Universal-Luer-Adapter mit
Gerinnselfänger verwenden

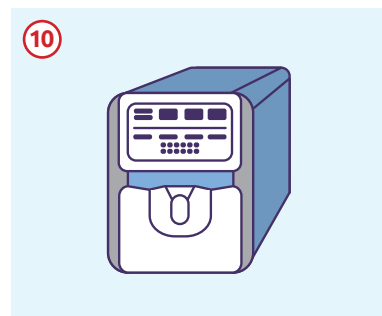

10 Probe nach Angaben des Geräteherstellers
aspirieren (siehe Bedienerhandbuch Ihres
Blutgas/ISE-Analysegerätes)

HINWEIS: Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie ersetzen keinesfalls die Angaben und Anweisungen der jeweiligen Gebrauchsanweisung sowie der einschlägigen Fachliteratur.